

Anweisungskarte

Diese Karte enthält Anweisungen zur Verwendung von OSA^{sense} S18



Fragenbogen

- Füllen Sie den Fragenbogen über den Link in Ihrer E-Mail aus oder melden Sie sich unter ch.osasense.com mit Ihrer Telefonnummer oder einem Code Ihres Gesundheitsdienstleisters an.




OSA^{sense} S18

- Sehen Sie sich die Anweisungen auf www.osasense.nl/video an. Befestigen Sie den OSA^{sense} S18 an Ihrem linken Handgelenk. (Foto 1) Nehmen Sie den Sensor aus der Verpackung und entfernen Sie die Schutzfolie.

ACHTUNG: Von den Nägeln darf keine künstliche Fingernägel oder Nagellack aufgetragen werden. Sie können auch keine Messung bei vermindertem Blutfluss durchführen, der durch einen zu festen Sensor oder einen zu kalten Finger verursacht werden kann.

Sensor befestigen

- Legen Sie Ihren linken Zeigefinger oder Ringfinger auf den Sensor wie auf Foto 3 zu sehen.
- Kleben Sie dann die Flügel an die Seite Ihres Finger.
- Falten Sie den Sensor über Ihren Finger.
- Kleben Sie nun die Flügel ohne viel Spannung über Ihren Finger.

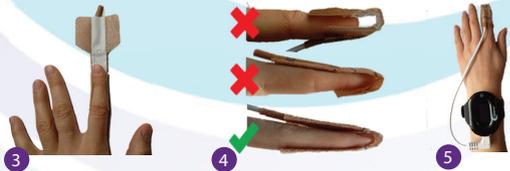

➔ Die Anweisungen gehen auf der Rückseite weiter.

Prüfen Sie

- Stellen Sie Sicher, dass der Sensor den Finger berührt, siehe foto 4.
- Stellen Sie Sicher, dass der Sensor gerade auf dem Finger sitzt, siehe foto 7.

Anschließen

- Verbinden Sie den Sensor mit dem OSA^{sense} S18.
- Berühren Sie das -symbol, bis sich der Bildschirm einschaltet.
- Das Gerät fährt nun hoch.
- Wenn der Bildschirm nun wie in Abbildung 6 aussieht, können Sie die Messung starten.

Schlafen

- Lassen Sie die OSA^{sense} S18 und den Sensor die ganze Nacht eingeschaltet.
- Achten Sie darauf, dass die OSA^{sense} S18 nicht nass wird.
- Sie können das Display von OSA^{sense} S18 einoder ausschalten, indem Sie das -symbol berühren.
- Sie können jetzt schlafen.

Beenden Sie die Untersuchung

- Trennen Sie am morgen den Sensor von der OSA^{sense} S18.
- Entfernen Sie vorsichtig das Sensor von Ihrem Finger.
- Kleben Sie ihn wieder auf die Plastiksenschutzfolie.

② Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an Ihr Gesundheitsdienstleister.

