

# Gebruikerskaart

Deze kaart geeft instructies over het gebruik van de OSAsense S18



## Vragenlijst

- Vul de vragenlijst in via de link in uw e-mail of log in op [www.osasense.nl/login](http://www.osasense.nl/login) met uw 06 nummer of een code van uw zorgverlener.



## OSAsense S18

- Bekijk de instructie op [www.osasense.nl/video](http://www.osasense.nl/video)  
Bevestig de OSAsense S18 (foto 1) om uw linker pols.  
Haal de sensor uit de verpakking en haal het beschermfolie van de sensor. Zie foto 2.

LET OP: Als er kunstnagels of nagellak op uw nagels zitten kan er geen meting worden gedaan. De sensor kan ook niet meten bij verminderde doorbloeding dit kan komen door een te strak geplakte sensor of een te koude vinger.

## Sensor bevestigen

- Leg uw linker wijs- of ringvinger op de sensor zoals te zien in foto 3.
- Plak vervolgens de vleugeltjes op de zijkant van uw vinger.
- Vouw de sensor over uw vinger.
- Plak nu rustig zonder veel spanning de vleugeltjes over uw vinger.




➔ De instructies gaan verder op de achterkant.


## Controleren

- Zorg ervoor dat de sensor de vinger raakt, zie foto 4.
- Zorg ervoor dat de sensor recht op de vinger zit, zie foto 7.

## Aansluiten

- Verbind de sensor aan de OSAsense S18.
- Raak het -symbool aan totdat het scherm aangaat.
- Het apparaat start nu op.
- Als het scherm er nu net zo uitziet als foto 6 dan kunt u de meting starten.

## Slapen

- Houd de OSAsense S18 en de sensor de gehele nacht om.
- Zorg ervoor dat de OSAsense S18 niet nat wordt.
- Het display van de OSAsense S18 kunt u aan of uitzetten door het -symbool aan te raken.
- U kunt nu slapen.

## Onderzoek afronden

- Koppel de sensor's ochtends los van de OSAsense S18.
- Haal de pleister voorzichtig los van de vinger.
- Plak deze terug op het plastic beschermfolie.

② Neem bij vragen contact op met uw zorgverlener.

